

REVOLAX™



Fine con Lidocaína
Superficiales superiores a la dermis.

Líneas de la frente, patas de gallo, líneas glabella, arrugas del cuello, contorno bajo del párpado.



Deep con Lidocaína
Dermis media o profunda / capa subcutánea

Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla.



Deep sin Lidocaína
Dermis media o profunda / capa subcutánea

Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla.



Sub-Q con Lidocaína
Capa subcutánea profunda

Arrugas profundas, Nariz, Mejillas, Contorno y aumento de la papada.



Ventajas

1. Propiedades

Beneficios de REVOLAX™

Alta pureza

REVOLAX™ es un gel bio-degradable que utiliza ácido hialurónico con alta pureza a partir de la fermentación bacteriana. Es una sustancia natural optimizada para adaptarse al tejido de la piel humana.

Óptima reticulación (HA)

Nuestra tecnología única de reticulación no necesita la adición de ácido hialurónico libre para ajustar las propiedades físicas del gel.


Visco-elasticidad

Visco-elasticidad es uno de los elementos más críticos que determinan la longevidad. El efecto de volumen y la capacidad de moldeo del gel han sido optimizados por el nivel de visco-elasticidad del producto acorde al área a usar y área de tratamiento. REVOLAX™ asegura una mayor duración y un fuerte apoyo estructural de la piel.

Consistente, monofásico

REVOLAX™ es una estructura monofásica regular y densa. La consistencia del patrón asegura no sólo el volumen armonizado de forma natural, la inyección fácil y cómoda para ambos, doctores y pacientes.

REVOLAX™
Regular Pattern,
Dense Structure

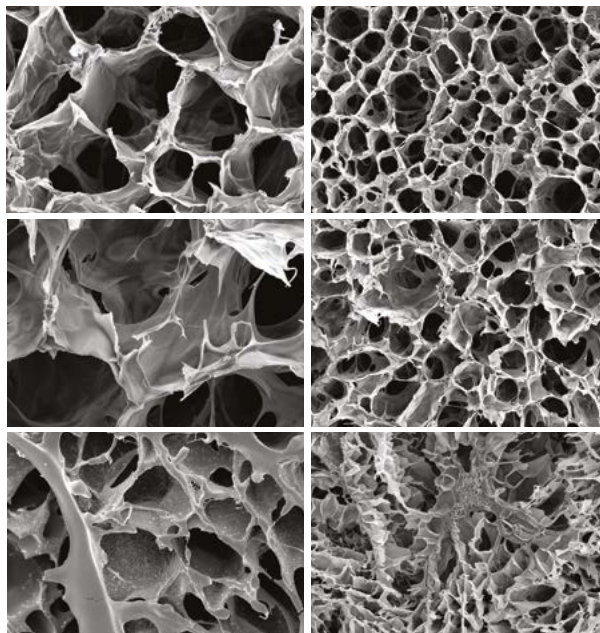

J Filler

P Filler

REVOLAX™ tiene una estructura monofásica de red regular y densa que permite la inyección suave constante durante todo el tratamiento y ayuda de forma natural al volumen armonizado y apariencia natural.

Los patrones de densidad de REVOLAX™ a diferencia de otros rellenos de HA hacen que la estructura sea mucho más sólida y duradera y más natural durante todo el proceso de absorción de la piel.

REVOLAX™


Ventajas

2. Función

Inyección suave

- Mediante el uso de Ultra, una aguja de pared delgada, obtenemos una inyección suave y útil para minimizar el residuo o pérdida de producto.
- Debido a la estructura monofásica uniforme, REVOLAX™ se puede inyectar correctamente sin HA libre.


Gráfico de prueba de fuerza de extrusión

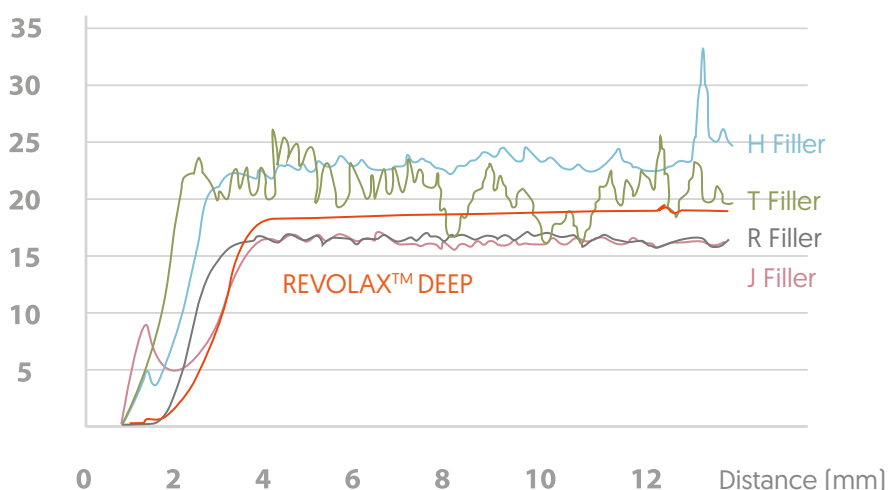

** Ref. Datos de archivo Across

** La inyección constante y suave con menos fuerza.

La fuerza de extrusión constante permite a los doctores controlar la inyección de forma fácil y segura durante todo el procedimiento.

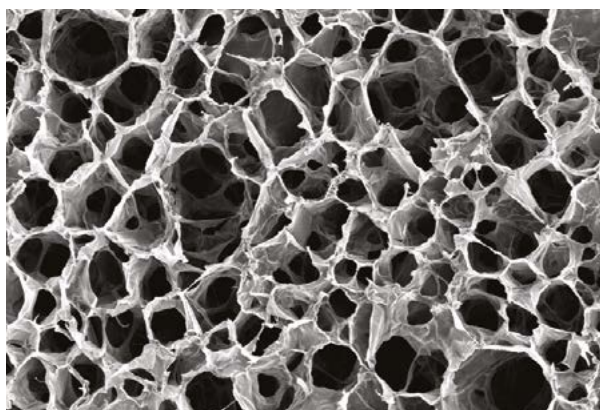

Durabilidad

La fuerte y densa estructura monofásica de ligazón del polímero de AH asegura una larga duración más allá de lo previsto.

REVOLAX™

Ventajas

3. Estudio clínico

Eficacia y seguridad de REVOLAX™ Sub-Q con lidocaína-Estudio Clínico
Resultado [NCT02179606]


Diseño del estudio

Multicéntrico, aleatorizado, sujeto y evaluador ciego, Split-Face, comparativo (24 semanas)

Sujetos

60 sujetos con WSRS confirmado [Escala de clasificación de profundidad de las arrugas] de grado 3 ó 4 con pliegues nasolabiales que requieren corrección.


Comparación de los medios de WSRS * en la semana 24

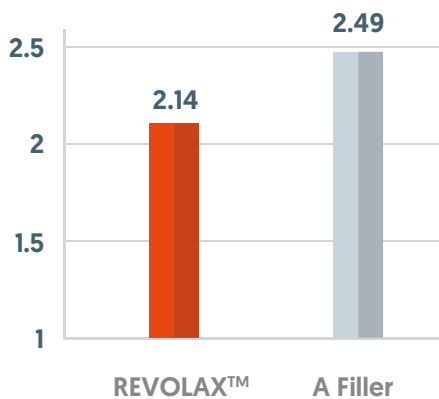

Resultado: las puntuaciones medias WSRS * evaluadas en la semana 24 de REVOLAX™ son más bajas (menos arrugas) que los de un grupo de Relleno.

*Clasificación de profundidad de las arrugas [WSRS]
5: Extremo 4: Severo 3: Moderada 2: Suave 1: Ausente

Evaluación de los resultados estéticos globales por los investigadores y los sujetos [Calculado a partir GAIS]

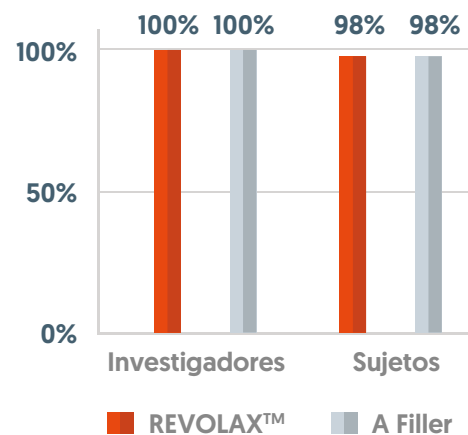

Tanto los investigadores y los sujetos estaban altamente satisfechos con el resultado del grupo REVOLAX™ después de 6 meses.

* Escala Global mejora estética. [GAIS]

Resultados


En conclusión, el ensayo clínico verifica que REVOLAX™ es un dispositivo médico eficaz y seguro para la corrección de pliegue naso labial y no inferior al dispositivo de referencia, A-filler®

Llevada a cabo por:

- Hospital de la Universidad Chung-Ang de Corea del Sur
- Hospital General Eulji de Corea del Sur

Especificaciones del producto.

Zona de aplicación recomendada:

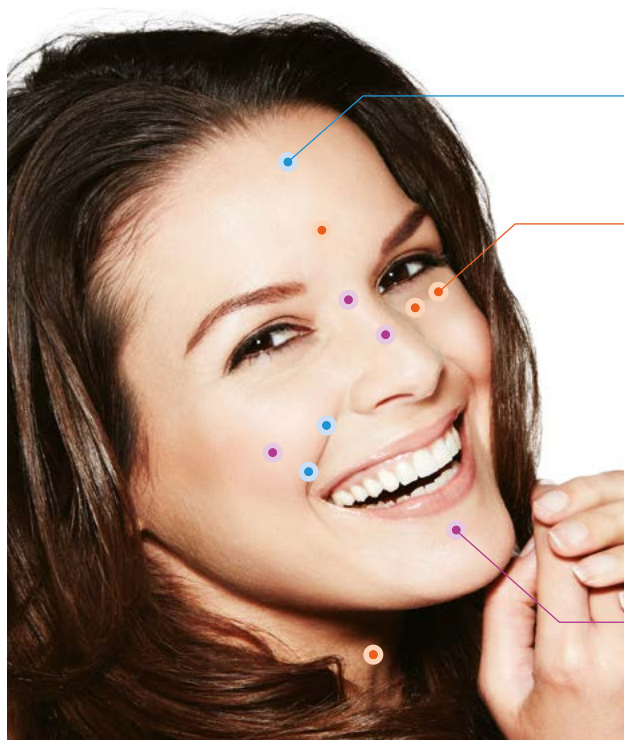

REVOLAX™ Deep con lidocaína y sin lidocaína

Media a dermis profunda / capa subcutánea
Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla

REVOLAX™ Fine con lidocaína

Parte superficial y superior de la dermis
Líneas de la frente, patas de gallo, líneas glabellares, arrugas del cuello, contorno del párpado

REVOLAX™ Sub-Q con Lidocaína

Capa subcutánea profunda
Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla

Revolax™ ácido hialurónico dermal	REVOLAX™ FINE con lidocaína	REVOLAX™ DEEP con lidocaína	REVOLAX™ DEEP sin lidocaína	REVOLAX™ SUB-Q con lidocaína
Composición	HA 24mg/mL Lidocaine 0.3%	HA 24mg/mL Lidocaine 0.3%	HA 20mg/mL	HA 24mg/mL Lidocaine 0.3%
Indicaciones Recomendadas	Líneas superficial; líneas frontales y glabellares, patas de gallo, las arrugas del cuello	Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla.	Pliegues naso-labiales, líneas de la risa, la frente, la nariz, mejillas, aumento de la barbilla.	Arrugas profundas, Nariz, Mejillas, Contorno y aumento de la papada.
Inyección Dérmica	Dermis superficial	Med/Prof dermis, subcutánea	Med/Prof dermis, subcutánea	Profunda subcutánea
Volumen	1.1mL	1.1mL	1.0mL	1.1mL
Tamaño de aguja	30G	30G	27G	25G
Duración	8 ~12 meses	8 ~12 meses	8 ~12 meses	8 ~12 meses
Vida útil	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses



medyglobal

Solutions for aesthetic
and dermatological medicine

medyglobal.com
info@medyglobal.com
[+34] 918 27 09 52